

Érintésvédelem: 230V-50Hz-30W IP20-Fu: F1T 500mA

A WS elektroporátor előző társaihoz képest sokkal nagyobb teljesítményű készülék, ezért bizonyos érintés védelmi szabályok betartása szükséges az esetleges kellemetlen, de teljesen veszélytelen kisfeszültségű áramütések miatt.

A WS készülék működési elvéből kifolyólag igen nagy elektromos mező jön létre a kezelő fej közvetlen környezetében, ami azt eredményezi, hogy ha a közvetlen környezetébe egy másik vezető kerül, akkor kiszámíthatatlan elektromos kisülések keletkezhetnek (mint egy villámcsapás, persze egészen kicsiben..). Ezért a készüléket lehetőleg szigetelt, tehát elektromos áramot nem vezető műanyag felületű tartóra (polc, asztal, stb..) helyezzük.

A készüléket használat közben csak a felső részen található sötétszürke kezelő felületen érinthetjük meg. A készülék által generált elektromos mező csak működés közben a kezelőfej közvetlen környezetében jön létre, ezért aki a kezelő fejjel működés közben érintkezésbe lép, nem viselhet fém tárgyakat, ékszereket.

A készülék kezelőfejét, ill. bármi más fém eszközt, keretet ne érintsünk meg egyszerre (pl.: számítógép, mobil telefon..). Aki a kezelő fejjel érintkezésben van, az kerüljön minden más elektromossággal működő fémházas készüléket, ill. minden egyéb fém tárgyat. A kezelés során a kezelő és a kezelt személy kerüljenek minden egyéb fizikai kontaktust más harmadik személlyel.

A WS elektroporátor kezelő fejének közvetlen környezetében lévő elektromos készülékek, adathordozásra alkalmas eszközök (mobiltelefon, számológép, számítógép, magnó kazetta, floppy, merevlemez, memóriakártya...) súlyos és visszafordíthatatlan károkat szenvedhetnek.

A kezelést kizáró tényezők:

- 1.) a kezelt személy szervezetébe pacemakert ültettek
- 2.) epilepsziában szenved
- 3.) terhes
- 4.) a kezelt bőrfelületen aktív aknés elváltozások láthatók

Forgalmazó: Medist Kereskedelmi Kft. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 1, Tel: + 36 20 545 5518 +36 1 266-5011

Email: info.medist@gmail.com



Wave System elektroporátor
(Made in France – BFP Electronique)

Használati útmutató

A készülék tartozékai: 1db hálózati csatlakozó, 1 db 2,3 cm átmérőjű kezelőfej, 1db 5 cm átmérőjű kezelőfej, 2db biztosíték.

Használat:

Vegyük ki a csomagolásból az elektroporátort, majd a hálózati csatlakozóval csatlakoztassuk (1. ábra).

1. Válasszuk ki a kezeléshez szükséges kezelőfejet (2.-3. ábra) – arc, nyak, dekoltázs, has, comb, fenék kezeléséhez ajánlott a nagy kezelőfej használata, -arc ill. szem és ajak körüli ráncok kezelésére a kis kezelőfej használata javasolt. A kezelőfejet csatlakoztassuk a gép hátsó részén (4. ábra).

2. Fertőtlenítsük a kezelőfejet és a letisztított kezelendő felületet (ajánlott bőr és eszközfertőtlenítő: Octenisept).

3. Az elektroporátor ki/bekapcsolása (on/off) 0/I gombokkal (5. ábra) történik. Bekapcsoláskor megjelenik a „*Bienvenue*” üdvözlő felirat.

4. Válasszuk ki a megfelelő fokozatot, a gépen található gombok megnyomásával (6. ábra)

(1) *low-sensitive* -nagyon érzékeny bőr esetén,

(2) *medium* – közepes fokozat, arckezelésre,

(3) *high* – magas fokozat, testkezelésre.

5. A gép indítása a start gomb megnyomásával történik (6. ábra).

A kezelési idő megjelenik a kijelzőn.

A kezelés végén a ki/bekapcsolás gombokat használjuk (5. ábra).

FIGYELEM! A kezelésekhöz kizárólag a gép forgalmazója által javasolt hatóanyagok használata engedélyezett. Kérem, figyelmesen olvassa el az Érintésvédelmi szabályokat!

Működési elv: Az elektroporátorral végzendő fájdalommentes rádiófrekvenciás módszer – elektroporézisen alapuló beviteli módszer, melyben a kezelőfejből szétterjedő rádióhullámok a bőrben és a bőrsejtek membránján (akvaparin 2) hatóanyag csatornákat nyitnak meg, lehetővé téve a hatóanyagok bejuttatását a megfelelő helyre.



1. ábra



2. ábra




3. ábra



4. ábra



5. ábra

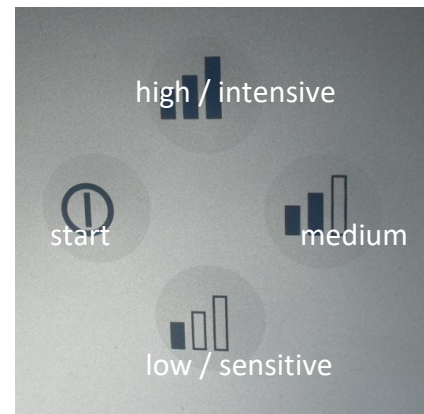

6. ábra